

AudioKey 3 Quick Guide

Bimodales Streaming für iOS

Richten Sie Ihre bimodale Streaming-Konfiguration in Ihrem MED-EL Streaming-Gerät und Ihren Starkey Hörgeräten ein. Genießen Sie Streaming von Ihrem Smartphone zu beiden Ohren in True-Stereo.

Voraussetzungen

Kompatible Hörhilfen

Starkey Hörgeräte

- Edge AI Serie, Genesis AI Serie

MED-EL Streaminggeräte

- SONNET 3, SONNET 3 EAS, AudioStream, AudioStream Adapter

Smartphone-Voraussetzungen

- iPhone mit iOS 16 oder höher
- 200 MB freier Speicherplatz
- Internetverbindung
- Es gelten die gleichen Anforderungen wie für [AudioKey 3](#) (siehe Abschnitt Technische Daten).

Anleitung

Öffnen Sie die  **Verbindungsoptionen** über das Hauptmenü. Wählen Sie die Kombination aus, die Sie konfigurieren möchten (Starkey Hörgerät + AudioStream oder SONNET 3).

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm:

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Starkey Hörgerät nur über eine aktive Verbindung mit diesem Smartphone verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass das MED-EL Streaminggerät keine aktive Verbindung zu einem Gerät hat.

Nach erfolgreicher Verbindung wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Jetzt können Sie Musik auf beide Geräte streamen.

Fehlerbehebung

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte für bimodales Streaming über iOS-Geräte qualifiziert sind (siehe Abschnitt Voraussetzungen).

Stellen Sie sicher, dass das Starkey Hörgerät über eine aktive Verbindung zum verwendeten Smartphone verfügt, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Stellen Sie sicher, dass der SONNET 3 keine aktive Verbindung zu einem anderen Gerät hat, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.